


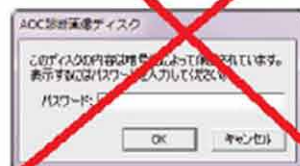
起動のしかた

診断画像ディスクをコンピュータのディスクドライブにセットする。
診断画像ディスクの操作画面が表示されます。


 以下の画面は標準的な例です。ご利用のディスクによっては、実際に表示されるボタンの種類などが異なる場合があります。



~~暗号化されたディスクの場合は、先にパスワード入力画面が表示されます。指定されたパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。~~



▲ パスワード入力画面

 画面が自動的に表示されない場合は、「コンピュータ」または「マイコンピュータ」から診断画像ディスク内の「VIEWER」フォルダを開き、「AFC.exe」をダブルクリックしてください。

画像の見かた

「専用ビューワで見る」ボタンをクリックします。

ここをクリック  Web ブラウザで画像を見るときはここをクリック


 詳しい説明を見るときはここをクリック

選択画面が表示されます。見たい検査の行をクリックして選択し、「簡易表示」または「表示」をクリックすると、専用ビューワが起動して診断画像が表示されます。




* 「表示」を選択すると「簡易表示」よりも利用できるビューワ機能が増えます。画像を見るだけなら通常は「簡易表示」で十分です。

終了のしかた

1 診断画像ディスクの操作画面やビューワの右上の閉じるボタン  をクリックする。画像が閉じます。

2 ディスクドライブからディスクを取り出す。

 ディスクは、画面を閉じてから取り出してください。画面を閉じずにディスクを取り出そうとすると、エラーが表示されることがあります。

動作環境

- OS : windowsXP SP3以降
(Mac OSには対応していません)
- Webブラウザ : Internet Explorer 6以降
- メモリ : 1.5GB以上

上本町画像診断クリニック
06-6776-8821

▶ 目次

←操作方法を参照する際は「目次」をクリック

はじめに

このヘルプには、診断画像ディスクを使うための方法やヒントが書かれています。

- 左側に並んでいる項目を選んでクリックすると説明が表示されます。
- 三角形（▶ または ▾）が付いている項目は、クリックすることにより下位の項目を展開したり格納できます。
- 右上の「戻る」をクリックすると、直前に表示していたページに戻ります。
- 左の「目次」をクリックすると、目次の表示 / 非表示を切り替えることができます。

※専用ビューアにて操作する際、PCが重くフリーズする場合があります。フリーズした際は、しばらく待っていただくか、再度CDを入れ直してください。

はじめに

起動/終了のしかた

▼ 診断画像の見かた

- ▶ 診断画像を開く
- ▶ 画像をビューする
- ▶ 表示するシリーズを変更する
- ▶ セルの構成を変更する
- ▶ 検査の異なる画像を比較する

▶ 基本的な機能を使う

▶ その他の機能

▶ 画面各部の名称とはたらき

その他

目次

受付 診察 会計 管理 << 戻る

診断画像を開く

1. 診断画像ディスクが起動している状態で **有用ビューアで見る** をクリックします。

2. リストから目的の検査をクリックして選択し、「表示」ボタン（**表示**）をクリックします。ビューウィンドウが表示されます。ビューウィンドウは「セル」と呼ばれる四角い部分から構成されています。診断画像はシリーズごとにセルのなかに表示されます（→ビューウィンドウ）。
注意：動画などの読み込み中、ビューウィンドウに「応答なし」と表示されても、実際には処理が継続していることがあります。処理が完了すると「応答なし」表示が消えますので、しばらくお待ちください。
